

Серия Celer™

Многокассетный паровой автоклав

Простой в использовании

Выберите цикл и
запустите его, так просто!

Надежный

Низкий уровень
аварийности благодаря более
чем 15-летнему опыту.

Неагрессивный метод стерилизации

пар впрыскивается импульсами
положительного давления, безопасно и
щадяще для дорогих инструментов.

Безопасный

Предохранительный клапан гарантирует корректную
работу оборудования.

Компактный

Компактная структура позволяет разместить автоклав
на или под столом

Высокотехнологичный

Данные можно сохранить и отследить!

Высокоэффективный


Самый короткий цикл стерилизации без упаковки
составляет 6~8 минут, Цикл стерилизации изделий в
упаковке составляет 10~15 минут. Для автоклава можно
выбрать одноуровневые, двухуровневые или трехуровневые
кассеты, что позволяет значительно сократить цикл
стерилизации и сэкономить занимаемое автоклавом пространство.



Экономьте свое время и пространство!

Принцип работы

Пар подается при помощи импульсов положительного давления, что позволяет безопасно и щадяще стерилизовать дорогие инструменты.

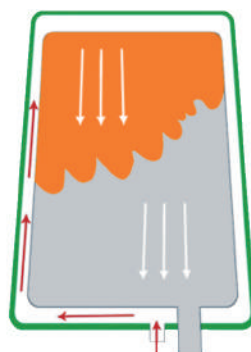

Параметры цикла

Символ	Цикл	Температура стерилизации	Время стерилизации	Время сушки	Положительный импульс
	Быстрый режим (без упаковки N)	134°C	240s	900s	1
	Обычный режим (в упаковке S)	134°C	240s	3600s	3
	Полые инструменты (без упаковки S)	134°C	600s	900s	3
	Низкотемпературный режим (в упаковке S)	121°C	1800s	900s	3
	Пользовательский режим (смешанный)	134°C	900s	900s	6
	Воздушная сушка (вспомогательная)	-----	-----	900s	-----

Спецификация модели

Модель	Celer™ 2000			Celer™ 5000			Celer™ 6000		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Длина (мм)	615								
Ширина (мм)	320								
Высота (мм)	320	470	620	320	470	620	320	470	620
Вес нетто	27	41	55	33	54	75	33	54	75
КПД	1.3	2.6	3.9	1.3	2.6	3.9	1.3	2.6	3.9
Размер кассеты	390×196×40mm			480×196×80mm			570×196×80mm		
Объем кассеты	1.8L			5.2L			6.0L		
Рабочая температура	115°C ~ 134°C								
Источник питания	AC 220V±22V; 50Hz±1Hz;								

AIKSMED

JIANGSU AIKSMED EQUIPMENT CO., LTD
 Индустриальный парк "Синьянь", город
 Дасинь, городской уезд Чжанцзяган,
 провинция Цзянсу, Китай
 Электронная почта: sales@aiksmmed.com
 Тел/факс: 0086-512-5876-3098, WWW.AIKSMED.COM



Официальный торговый
представитель:

